

Pour une
thérapie axée
sur le patient



iai Kit de test contenant tous les documents et matériels pour le prélèvement d'échantillons

Pourquoi une analyse de germes pathogènes?

La parodontite est une maladie provoquée par des bactéries spécifiques qui détruisent les tissus mous et les tissus osseux parodontaux. Pour un traitement ciblé et durable de la parodontite, l'élimination ou, en tout cas, la réduction significative des germes paropathogènes est d'une importance capitale. La composition du biofilm paropathogène différant fortement d'un individu à l'autre, un traitement ciblé n'est possible que sur la base d'une analyse du spectre des germes. Seuls les résultats permettent de mettre en place une stratégie thérapeutique optimale et personnalisée avec une utilisation minimale d'antibiotiques.

Exemple de résultat

ANALYSE


Institut für Angewandte Immunologie (IAI AG) | Eschenweg 6 | 4528 Zuchwil | Suisse
Tél +41 32 685 54 62 | Fax +41 32 685 54 92 | E-Mail: iai@padotest.ch | www.padotest.ch




Cabinet dentaire: XXXXXXXXXXXX
Dentiste: XXXXX XXXXXXXX
Patient(e): XXX XXXXX

Numéro: T000001
Publié par: XXXXXXXXXXXX XXXX
Validé par: XXXXXXX XXXXXXX


iai PadoTest standard

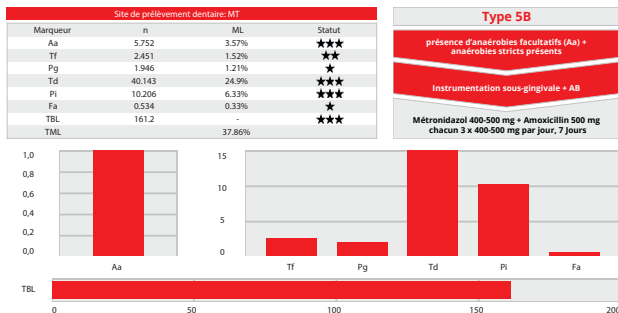

iai PadoTest Plus

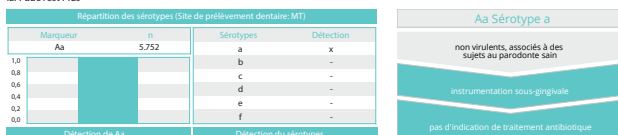


Votre thérapie combinée

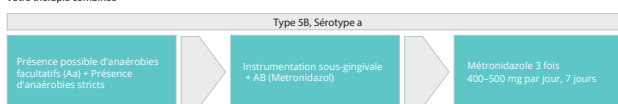

Aa = Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Tf = Tannerella forsythia
Pg = Porphyromonas gingivalis
Td = Treponema denticola
Pi = Prevotella intermedia
Fa = Filifactor alocis
TBL: Nombre total de germes ou Total Bacterial Load
TML: Total Marker Load, pourcentage de germes pathogènes par rapport au nombre total
Marker Load, pourcentage de chaque germe par rapport au nombre total
*La décision d'administrer des antibiotiques revient au dentiste traitant.

iai PadoTest Détermination des germes marqueurs

Le **iai PadoTest** identifie au total six types de germes (dont tous les marqueurs significatifs) à l'aide d'une analyse ADN et fournit des résultats d'une grande pertinence à un prix particulièrement attractif. Pour la détermination, vous pouvez choisir entre un test multisite (pool d'échantillons) avec des prélèvements dans plusieurs poches gingivales ou un test monosite pour réaliser une détermination par poche gingivale pour jusqu'à quatre poches différentes par examen.

Germes marqueurs	
<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>	×
<i>Porphyromonas gingivalis</i>	×
<i>Tannerella forsythia</i>	×
<i>Treponema denticola</i>	×
<i>Filifactor alocis</i>	×
<i>Prevotella intermedia</i>	×
iai PadoTest Plus Sérotypes: a, b, c, d, e et f	(X)

Résultats et thérapie fiables grâce à l'analyse de 6 germes marqueurs + en option 6 sérotypes du germe marqueur Aa

iai PadoTest Plus

iai PadoTest Plus permet d'identifier les sérotypes des *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa) et d'éviter un surtraitement antibiotique en liaison avec cet agent pathogène. Les sérotypes sont des variantes de différente virulence à l'intérieur de l'espèce Aa. Une distinction est faite entre les sérotypes a, b, c, d, e et f, sachant que le sérotype a affiche, avec une prévalence élevée, la virulence la plus faible et qu'il n'y a pas d'indication de traitement antibiotique.

Le diagnostic des sérotypes Aa à l'aide de **iai PadoTest Plus** est disponible en tant que complément optionnel du **iai PadoTest** régulier.

La parodontite a des conséquences!

Elle peut – outre des symptômes visibles comme l'inflammation ou la perte de dents – déclencher de nombreuses maladies systémiques. La parodontite a, par exemple, une incidence sur les maladies cardiovasculaires.



Vos avantages

- » Thérapie ciblée et personnalisée
- » Dépistage précoce de la charge bactérienne et évaluation du risque pour la thérapie d'appoint de la parodontite
- » Ni traitement insuffisant, ni surtraitement
- » Minimisation de l'utilisation des antibiotiques
- » Suivi aisé, y compris incitation à la prophylaxie
- » Motivation élevée et acceptation de la thérapie par le patient, c.-à-d. que le/la patient(e) voit dans le résultat une confirmation objective du diagnostic
- » Documentation du tableau des troubles
- » Preuve de l'absence complète d'inflammation avant l'implantation
- » Assurance juridique

Saviez-vous qu'en tant que cabinet dentaire vous pouvez consulter tous les commandes de vos patients en ligne sur www.padotest.ch?

iai PadoTest Prix

Les prix sont des prix de vente à la consommation. La facturation a lieu par tube expédié et utilisé. Prix plus 7.7% TVA.

Prix	CHF plus 7.7% TVA
1 site dentaire	55,00
2 sites dentaires	105,00
3 sites dentaires	155,00
4 sites dentaires	199,00
Test multisite	55,00
iai PadoTest Plus *	+ 24,00

* Supplément de prix! – Décompté en cas de détection *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa).

Abrechnung

Le/la dentiste facture directement au patient le traitement effectué, notamment le prélèvement, le conseil, le traitement complémentaire ou la prescription de remèdes, y compris les frais d'analyse du **iai PadoTest**.

Le cabinet dentaire reçoit mensuellement la facture pour l'analyse du **iai PadoTest**. Chaque facture contient des justificatifs à remettre au patient/à la patiente. Ils contiennent un décompte des frais selon le barème des honoraires des médecins allemands (GÖA) et peuvent ainsi être envoyés à la caisse de maladie (sans garantie de remboursement). La facture peut également être adressée directement au patient.

iai PadoTest Service



- » Récapitulatif des commandes en ligne
- » Résultats et factures consultables en ligne à tout moment
- » Kit **iai PadoTest** pour prélèvement d'échantillon avec envoi aller-retour sans frais de port
- » Facturation du cabinet ou du patient