


Gebrauchsanweisung / Probengewinnung



1. Auftrag

Füllen Sie alle Felder des Auftragsformulars gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus. Bitte Testnummer des Auftrags in Ihren Unterlagen notieren.

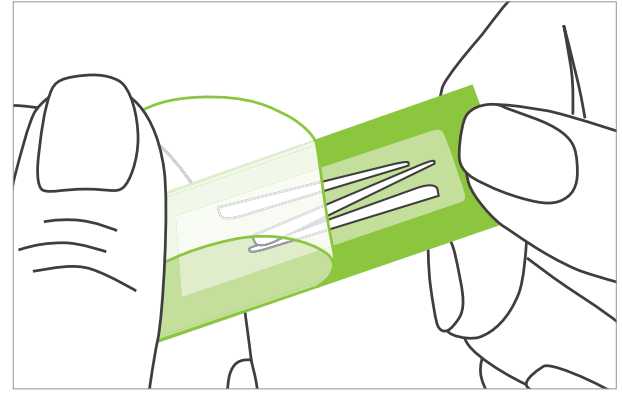

2. Vorbereitung

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle(n) für die Proben.

2a. iai PadoTest Multistellen-Test


Proben von mehreren Zahnfleischtaschen werden in einer Analyse zusammengefasst. Alle benutzten Papierspitzen in ein Röhrchen geben.

2b. iai PadoTest Einzelstellen-Test

Separate Analysen von bis zu vier verschiedenen Zahnfleischtaschen. Jede Papierspitze kommt in ein gesondertes Röhrchen.


Vor Probenentnahme:

Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle (keine professionelle Zahnreinigung).

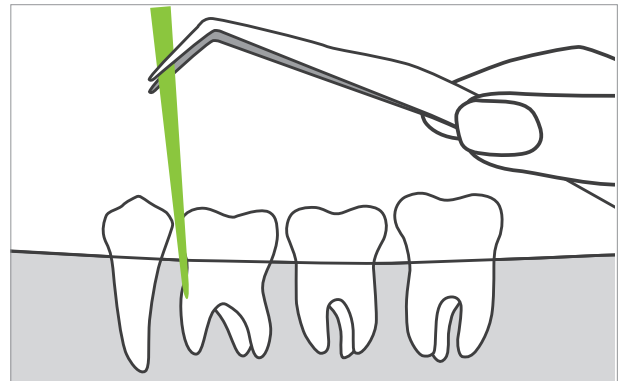

3. Probenentnahme


Papierspitze jeweils mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschengrund einführen und 10-15 Sekunden dort belassen.

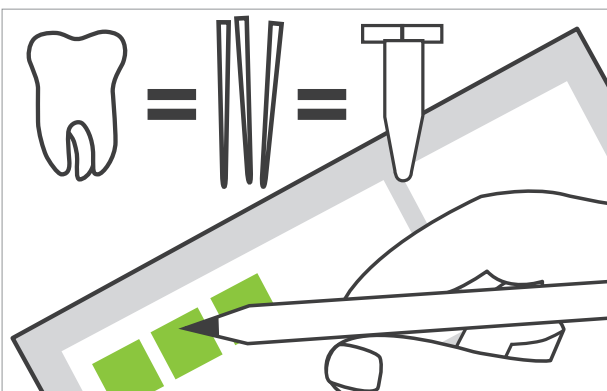

4. Zusammenfassung

Probenentnahmestelle und Taschentiefe zum jeweiligen Röhrchen auf dem Auftragsformular notieren.

Hinweis: Option „iai PadoTest Plus“ auswählen (Serotypenanalyse bei Nachweis von Aa).

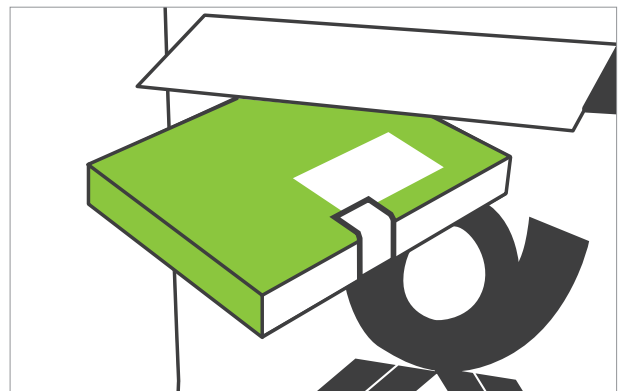

5. Versand

Proben und Dokumente in der iai PadoTest Testkitbox portofrei einsenden und das Ergebnis online (nach Registrierung) sowie per Briefpost (wenn gewünscht) erhalten.