



Für eine patientenorientierte Therapie



iai Testkitbox mit allen notwendigen Dokumenten und Materialien zur Probenentnahme

Warum eine Markerkeim-Analyse?

Parodontitis ist eine Krankheit, die auf spezielle Bakterien zurückzuführen ist und parodontales Weich- und Knochengewebe zerstört. Für eine zielgerichtete und langfristig erfolgreiche Parodontitistherapie ist die Elimination bzw. deutliche Reduktion der paropathogenen Keime von zentraler Bedeutung. Da die Zusammensetzung des paropathogenen Biofilms individuell stark variiert, ist eine gezielte Behandlung nur auf Basis einer Analyse des Keimspektrums möglich. Erst dieses Wissen ermöglicht die Planung einer optimalen und individuellen Behandlungsstrategie mit minimalem Einsatz von Antibiotika.


Beispielbefund

ANALYSE
Institut für Angewandte Immunologie iai AG | Eschenweg 6 | 4528 Zuchwil | Switzerland
Tel +41 32 685 54 62 | Fax +41 32 685 54 92 | E-Mail: iai@padotest.ch | www.padotest.ch



Praxis: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zahnarzt: XXXXX XXXXXXXX
Patient: XXX XXXXXXXX
Auswertung vom: XXXXXXXX
Testnummer: TXXXXXX
Freigegeben von: XXXXXX XXXXXXXXXX
Validiert von: XXXX XXXXX

iai PadoTest standard

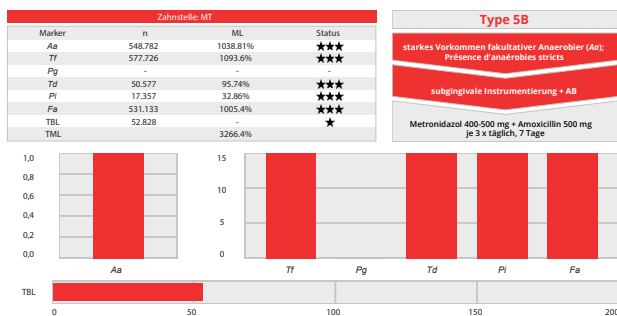

iai PadoTest Markerkeim-Bestimmung

Der iai PadoTest erfasst insgesamt sechs bedeutende Markerkeime mittels DNA-Analyse und bietet eine sehr hohe Aussagekraft zu einem besonders attraktiven Preis. Bei der Bestimmung können Sie zwischen einem Multistellen-Test (Poolprobe) aus mehreren Zahnfleischtaschen oder einem Einzelstellen-Test für die Einzelbestimmung pro Zahnfleischtasche von bis zu vier verschiedenen Taschen pro Untersuchung wählen.

| Markerkeime | |
|--|-----|
| <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> | × |
| <i>Filifactor alocis</i> | × |
| <i>Porphyromonas gingivalis</i> | × |
| <i>Prevotella intermedia</i> | × |
| <i>Tannerella forsythia</i> | × |
| <i>Treponema denticola</i> | × |
| iai PadoTest Plus Serotypen: a, b, c, d, e und f | (X) |

Sichere Befundung und Therapie dank der Analyse von 6 Markerkeimen + optional: 6 Serotypen des Markerkeims Aa

iai PadoTest Plus


Mit dem iai PadoTest Plus können Sie die *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa) Serotypen bestimmen lassen und eine Antibiotika-Übertherapie im Zusammenhang mit diesem Erreger vermeiden. Serotypen sind Varianten innerhalb der Spezies von Aa mit unterschiedlicher Virulenz. Es wird zwischen den Serotypen a, b, c, d, e und f unterschieden, wobei der Serotyp a mit einer hohen Prävalenz die niedrigste Virulenz besitzt und keine Antibiotikagabe indiziert ist.

Die Diagnostik der Aa Serotypen mit dem iai PadoTest Plus ist als optionale Ergänzung des regulären iai PadoTest verfügbar.

iai PadoTest Plus



Ihre kombinierte Therapie

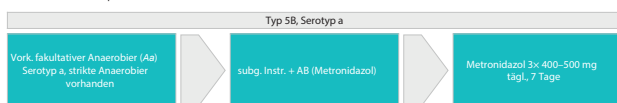

Aa = Aggregatibacter actinomycetemcomitans Tf = Treponema denticola TBL = Gesamtkeimzahl oder Total Bacterial Load
Tf = Treponema denticola Pi = Prevotella intermedia TML = Total Marker Load, Prozent pathogener Keime an der Gesamtkeimzahl
Pg = Porphyromonas gingivalis Fa = Filifactor alocis ML = Marker Load, Prozent des jeweiligen Keims im Verhältnis zur Gesamtkeimzahl
* Entscheidung zur Antibiotikagabe obliegt dem behandelnden Zahnarzt n = Anzahl Bakterien in Millionen

Parodontitis hat Auswirkungen!

Sie kann – abgesehen von offensichtlichen Symptomen wie Entzündung oder Zahnverlust – Auslöser für viele systemische Erkrankungen sein. So werden auch Herz- und Kreislauferkrankungen durch Parodontitis mitbestimmt.



Ihre Vorteile

- » gezielte und individuelle Therapie
- » Früherkennung der Bakterienbelastung und Risikoabschätzung für die unterstützende Parodontitis-Therapie
- » keine Unter- und Übertherapie
- » Minimierung des Antibiotikaeinsatzes
- » einfache (Verlaufs-)Kontrolle inkl. Prophylaxe-Anreiz
- » hohe Patientenmotivation und Zustimmung zur Therapie, d.h. der/die Patient/-in sieht den Befund als objektive Bestätigung der Diagnose
- » Dokumentation des Beschwerdebildes
- » Beweis der Entzündungsfreiheit vor Implantation
- » rechtliche Absicherung

Wussten Sie schon, dass Sie als Zahnarztpraxis online unter www.padotest.ch all Ihre Patienten-Aufträge abrufen können?

iai PadoTest Preise

Die Preise sind Endverbraucherpreise. Abrechnung erfolgt pro eingesendetem und benutztem Röhrchen.

| Preise | EUR |
|----------------------------|---------|
| 1 Zahnstelle | 39,00 |
| 2 Zahnstellen | 69,00 |
| 3 Zahnstellen | 99,00 |
| 4 Zahnstellen | 127,00 |
| Multistellentest | 39,00 |
| iai PadoTest Plus * | + 19,00 |

* Aufpreis! – Wird bei Nachweis von *Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa)* abgerechnet.

Abrechnung

Der/die Zahnarzt/-ärztin rechnet die vorgenommene Behandlung wie Probenentnahme, Beratung, Begleittherapie oder Heilmittelgabe inklusive Analysekosten für den **iai PadoTest** mit dem Patienten ab.

Die Rechnung für die Analyse vom **iai PadoTest** erhält die Zahnarztpraxis monatlich. Jede Rechnung enthält Einzelnachweise zur Weitergabe an den jeweiligen Patienten. Diese weisen eine Kostenaufstellung nach GOÄ (Deutschland) auf und können somit bei der Krankenversicherung eingereicht werden (ohne Erstattungsgarantie). Wahlweise kann die Rechnungsstellung auch direkt an den Patienten erfolgen.

iai PadoTest Service



- » Übersicht aller Aufträge online
- » Ergebnisse und Rechnungen jederzeit online abrufbar
- » **iai PadoTest**-Kitbox zur Probenentnahme mit portofreiem Hin- und Rückversand
- » Rechnung an Praxis oder Patient