



Mode d'emploi pour l'échantillonnage

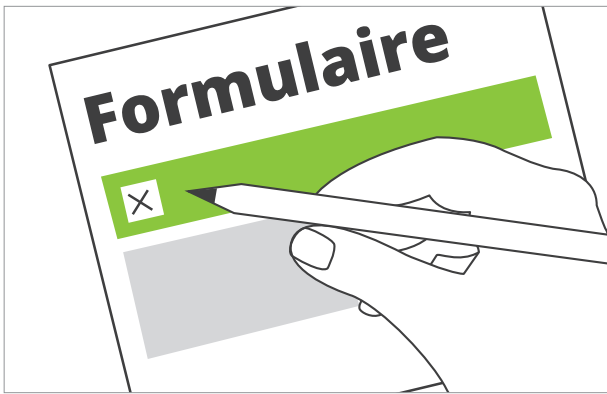

1. Contrat

Remplissez le formulaire de manière lisible avec un stylo. Notez soigneusement le numéro de test du formulaire dans vos dossiers.

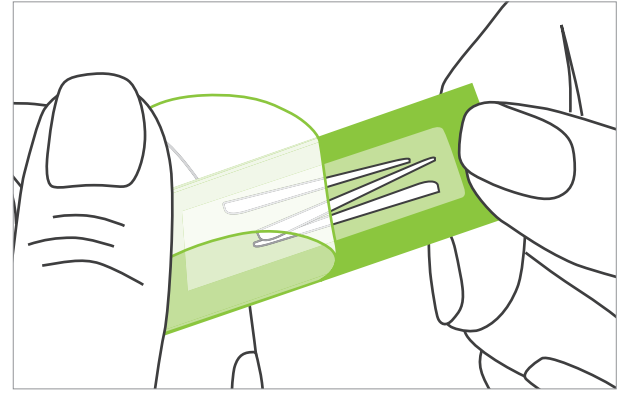

2. Préparation

Prenez les pointes de papier fournis et choisissez des poches dentaires pour la prise d'échantillons.


2a. Pool d'échantillons

Plusieurs échantillons de poches dentaires analysés simultanément: combinez simplement toutes les pointes de papier utilisées dans un seul tube.

2b. Echantillon séparé


Analyse séparée pour 1 à 4 poches dentaires: chaque pointe de papier est insérée dans un tube séparé.

Avant le prélèvement: enlèvement de la plaque supragingivale et séchage de la poche respective (pas de nettoyage professionnel des dents).

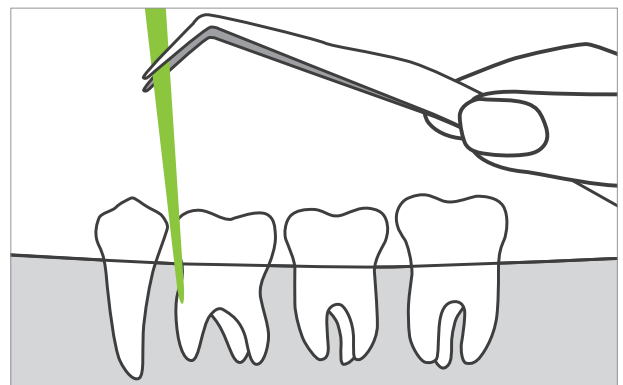

3. Échantillonnage


Insérez chaque pointe de papier avec des pinces stériles jusqu'au fond de la poche dentaire et attendez pendant 10-15 secondes.

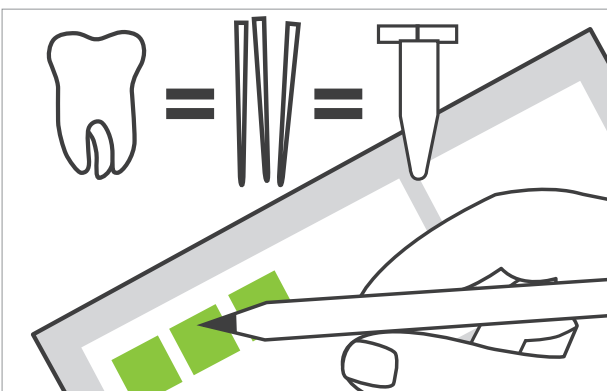

4. Récapitulatif

Notez l'emplacement de l'échantillon et la profondeur de poche associée sur le formulaire.

Remarque: sélectionnez l'option „iai PadoTest Plus“ (Diagnostic pour une thérapie personnalisée pour Aa).

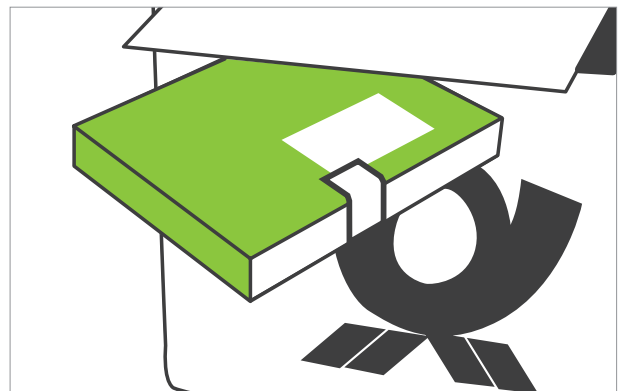

5. Envoi postal

Envoyez gratuitement les échantillons et formulaires associés via un kit de test iai PadoTest et recevez le résultat en ligne (après inscription) et par courrier (si désiré).