



Istruzioni per il prelievo del campione

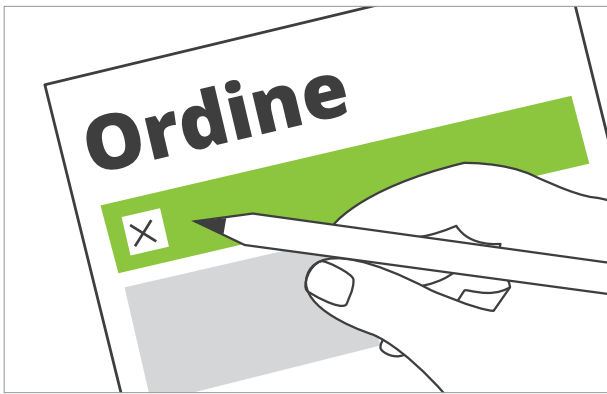

1. Ordine

Compili tutti i moduli in modo leggibile con una matita. Annoti il numero del test del modulo e lo conservi nei Suoi documenti.

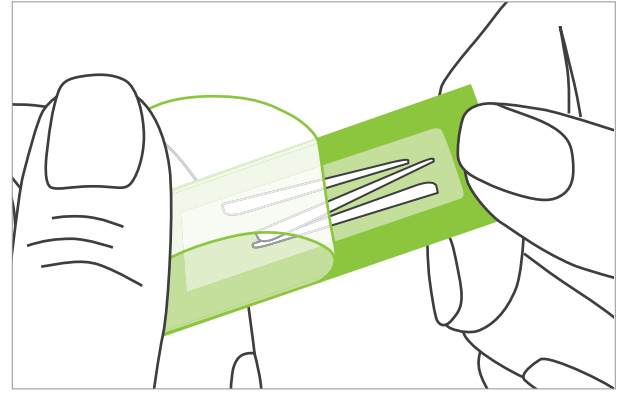

2. Preparazione del prelievo dei campioni

Prenda i coni di carta sterili e scelga il punto / i punti da cui prelevare il campione / i campioni.


2a. Campione multiplo

Campioni prelevati da varie tasche gengivali come parte di una stessa analisi. In questo caso inserire tutte le punte di carta usate in una sola provetta.

2b. Campione singolo


Analisi separate di un massimo di 4 tasche gengivali diverse. In questo caso inserire un solo cono di carta per ogni tasca gengivale in una singola provetta.

Prima del prelievo dei campioni: rimozione della placca sopragengivale e drenaggio del punto da cui si vuole prelevare un campione (senza effettuare la detartrasi).

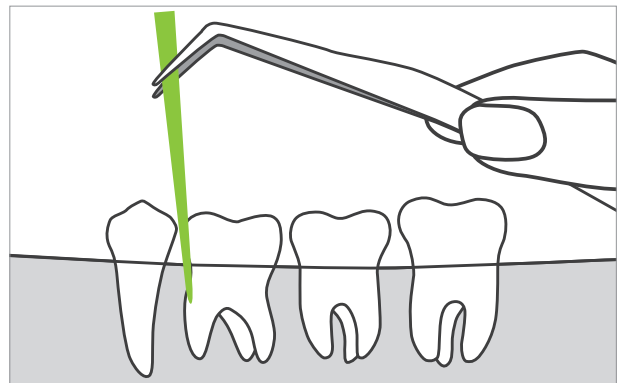


3. Prelievo di un campione

Inserire un cono di carta con una pinzetta sterile nella tasca gengivale fino a raggiungere il fondo del solco gengivale, dove resta per 10-15 secondi.

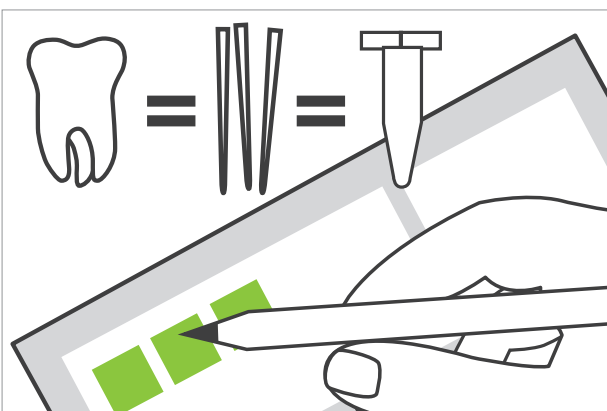

4. Resoconto

Annoti sul modulo dell'ordine i punti da cui ha effettuato i prelievi dei campioni e la profondità delle tasche gengivali dei singoli punti di prelievo per ogni singola provetta. *Nota: selezionare l'opzione «iai PadoTest Plus» (Diagnostica per una terapia personalizzata su Aa)*

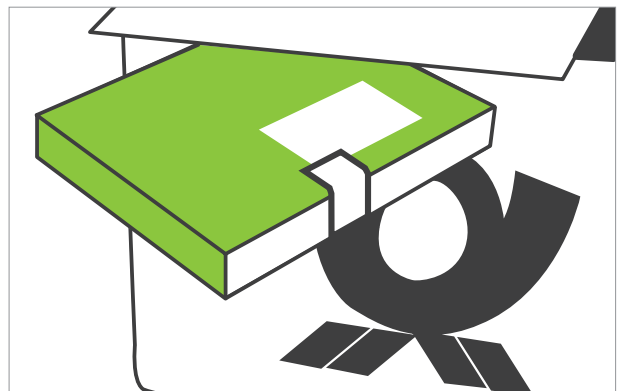

5. Spedizione

Inserire i campioni ed i documenti nella confezione di iai PadoTest, spedirla al laboratorio a carico del destinatario e visualizzare l'esito del test online (dopo la registrazione) oppure riceverlo per posta (su richiesta).